



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛУПРОДУКТОВ И КРАСИТЕЛЕЙ»
(ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»)**

РОССИЯ, 123995, г. Москва, ГСП-5, Б.Садовая ул., д.1 к.4 Телефон: (499) 251-31-00, Факс: (499) 254-12-00

Исх. № 06-1/2-1 от 18 июня 2012 г.

На _____ от _____

По вопросу применения
средства «АДС-521»

**Особенности применения
дезинфицирующего средства «АДС-521»**

Средство «АДС-521», содержащее в качестве действующих веществ глутаровый альдегид (1%), алкилдиметилбензиламмоний хлорид (0,5%), предназначено для дезинфекции стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок из разных материалов, коррозионностойких артикуляторов и слепочных ложек при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), грибковой и вирусной этиологии в лечебно-профилактических учреждениях.

Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, туберкулоцидной, фунгицидной (в отношении грибов рода Кандида и Дерматофитов, включая Трихофитон) и вирулицидной (включая Коксаки, ЕСНО, полиомиелит, гепатиты А, В, С и др., ВИЧ, грипп, в том числе H5N1, H1N1, герпес, аденовирусы и др.) активностью.

Средство может быть использовано многократно в течение 24 часов, а также для обработки не менее 50 оттисков до появления первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.).

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет один год, во вскрытой упаковке – не менее двух месяцев (до появления первых признаков изменения внешнего вида).

Руководитель темы,
зав. отделом, к.х.н.

Хан Ир Гвон